

# bruckhoff

## la belle

Upravljanje putem zraka

## junior

Upravljanje putem kostiju

Upute za uporabu

- HR -

## la belle

Upravljanje putem kostiju

## headset

Upravljanje putem kostiju



0123

Pečat distributera

B17040 - 8/17

# bruckhoff

AUDIA AKUSTIK GMBH

Herrenstraße 6

30159 Hannover

Njemačka

Tel: +49 (0) 511 16700-0

E-Mail: [service@bruckhoff.com](mailto:service@bruckhoff.com)

[www.bruckhoff.com](http://www.bruckhoff.com)



Mi razumijemo slušanje.

Uključivanje / isključivanje uređaja

la belle

la belle

junior

headset

**Vrijedi za sve upravljačke dijelove:**

Kod zatvorenog poklopca baterije Vaš je slušni uređaj uvijek automatski uključen.

Jednostavnim otvaranjem poklopca baterije isključujete slušni uređaj.



Zatvoreni poklopac baterije

Uključen



Otvoreni poklopac baterije

Isključen

Promjena baterije

la belle

la belle

junior

headset

**Vrijedi za sve upravljačke dijelove:**

Otvorite poklopac baterije. Uklonite bateriju uz pomoć priložene magnetne olovke.

Umetanje baterije slijedi na isti način, ali obrnuto: Umetnite novu bateriju tipa 312 s „+“ oznakom prema gore. Zatvorite poklopac. Slušni uređaj se automatski uključuje!

Magnetna olovka



Baterija tip 312 Standard\*



\*Opcionalno: baterija tip 13



**Informacije vezane uz sigurnost, održavanje i uporabu. Molimo da ih pročitate prije uporabe!**



Vaš slušni uređaj neće Vam vratiti normalni sluh niti sprječati ili poboljšati organski uvjetovani gubitak sluha.

**Sigurnosne napomene i upozorenja**

- Vaš slušni uređaj ne smiju nositi druge osobe. Postoji opasnost od oštećenja sluha.
- Neovlaštene izmjene na slušnom uređaju mogu oštetiti Vaš sluh.
- Nikada ne nosite Vaš slušni uređaj u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Držite slušni uređaj izvan dosegata male djece, osoba s kognitivnim oštećenjima i kućnih ljubimaca. Gutanje dijelova slušnog uređaja, osobito baterija, može biti opasno po život. Postoji opasnost od gušenja. U hitnim se slučajevima odmah javite liječniku ili u najbližu bolnicu.
- Kod bolova u uhu ili iza uha kao i kod povećane količine voska u uhu obratite se svom audiologu ili liječniku.
- Slušni uređaji kod klijenata s probušenim bubnjićima, upaljenim ušnim kanalima ili drugačije položenim šuplinama u unutarnjem uhu ne bi trebali biti prilagođeni pomoću kupole ili sustava zaštite cerumena. U ovakvim slučajevima preporučamo uporabu po mjeri izrađenog dosjednog dijela za uhu. U jako malo vjerovatnom slučaju,

kada bi kupola zapela u slušnom kanalu, preporučamo da posjetite specijaliziranog liječnika.

- Slušni programi s usmjerenim mikrofonskim modusom smanjuju pozadinske zvukove. Signali upozorenja ili zvukovi koji dolaze sa stražnje strane uopće se ne percipiraju ili se percipiraju jako slabo.
- Nemojte nikada spojiti Vaš slušni uređaj preko kabela s vanjskim audio uređajem, kao što je radio itd. To može dovesti do tjelesnih ozljeda (električni šok).
- Korištenje slušnog uređaja od strane osoba koje imaju aktivni implantirani medicinski uređaj (npr. srčani stimulator, defibrilator, itd.) zahtijeva prethodno savjetovanje sa specijaliziranim liječnikom (više informacija o tome možete pronaći na našoj web stranici [www.bruckhoff.com/sigurnosnenapomene](http://www.bruckhoff.com/sigurnosnenapomene)).

**Napomene o sigurnosti proizvoda, korištenju i održavanju**

Vaš je slušni uređaj robusne izvedbe te se može nositi kod svih uobičajenih svakodnevnih aktivnosti, nakratko i u ekstremnim uvjetima.

Elektronika slušnog uređaja mogla bi se oštetiti.

- Nije dozvoljeno vlažno čišćenje ulaza mikrofona. Na taj način će uređaj izgubiti svoja posebna akustična svojstva.
- Štitite Vaš slušni uređaj od vrućine.
- Za sušenje uređaja nemojte koristiti mikrovalnu ili neki drugi grijači uređaj.
- Kupola se mora promijeniti svaka tri mjeseca, odnosno kada postane tvrda ili lomljiva. Na taj se način sprečava nenamjerno odvajanje kupole kod uvođenja i vađenja iz uha.
- Nekorištene slušne uređaje po mogućnosti ostavite s otvorenim poklopcem od baterije kako bi mogla izaći vlaga.
- Kod dugotrajnog nekorištenja izvadite bateriju.
- Držite Vaš slušni uređaj uvijek na sigurnom, suhom i čistom mjestu.
- Nemojte dopustiti da Vam padne!
- Slabe ili neispravne baterije (npr. izlazak tekućine) odmah promijenite. Korištite uvijek samo nove baterije.
- Stare baterije ne bacajte u običnu smeće. Vaš će ih audiolog rado zbrinuti za Vas u skladu s propisima.
- Koristite samo baterije s najviše 1,5 V.
- Nemojte nikada koristiti srebrno-cin-kove ili litij-ionske baterije.

- Neki (zubni) medicinski pregledi s rendgenskim zrakama, kao npr. CT-pregledi, MRT/NMRT, mogu utjecati na funkcioniranje Vašeg slušnog uređaja. Skinite Vaš slušni uređaj prije takvih pregleda.
- Prije prolaska kroz sigurnosna vrata (npr. na aerodromu) nije potrebno skinuti slušni uređaj. Takvo neznatno rendgensko zračenje ne utječe na Vaš slušni uređaj.
- Nemojte koristiti Vaš slušni uređaj općenito na mjestima gdje su zabranjena elektronička pomagala.


**Detaljnije informacije možete pronaći na web stranici [www.bruckhoff.com/sicherheitshinweise](http://www.bruckhoff.com/sicherheitshinweise).**

**U slučaju nedoumice obratite se svom audiologu ili specijaliziranom liječniku.**

Umetnite la belle slušni modul (1) na Vaš nosač naočala. Koristite Vaše naočale bez slušnog uređaja – s natičnim završecima (2).

Dječji slušni sustav junior (3) spaja se s dva pritiska gumba (4) s čeonom trakom.

(5) headset slušni sustav se pomoću regulatora širine (6) prilagođava Vašem obliku glave.

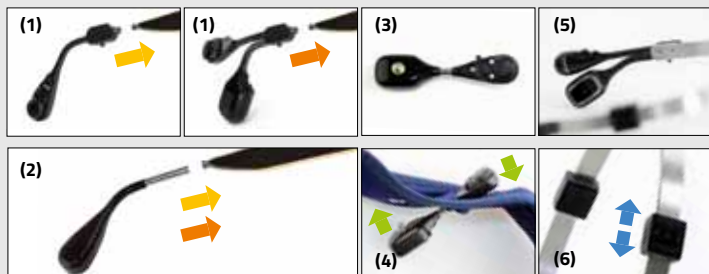

### Opcije podešavanja upravljački dio 1

Postoji 5 varijanti upravljačkih dijelova, koji se neznatno razlikuju u rukovanju.

#### Upravljanje putem zraka

##### la belle (s/bez vanjske slušalice)

Sljedeće funkcije je moguće samostalno podešavati:

- podešavanje jačine zvuka
- biranje slušnih programa
- uključivanje / isključivanje uređaja: vidi upute na drugoj stranici



### Opcije podešavanja upravljački dio 2

#### Upravljanje putem zraka

##### la belle (s/bez vanjske slušalice)

Sljedeće funkcije je moguće samostalno podešavati:

- biranje slušnih programa
- opcionalno: reguliranje jačina zvuka pomoću daljinskog upravljanja
- uključivanje / isključivanje uređaja: vidi upute na drugoj stranici




### Opcije podešavanja upravljački dio 3

#### Upravljanje putem kostiju

##### la belle (upravljački dio iznad/ispod)

Sljedeće funkcije je moguće samostalno podešavati:

- podešavanje jačine zvuka
- uključivanje / isključivanje uređaja: vidi upute na drugoj stranici

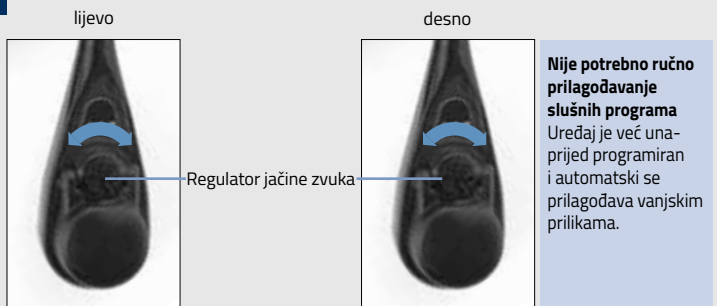

### Opcije podešavanja upravljački dio 4

#### Upravljanje putem kostiju

##### la belle (upravljački dio iznad/ispod) junior headset

Sljedeće funkcije moguće je samostalno podešavati:

- podešavanje jačine zvuka
- biranje slušnih programa
- uključivanje / isključivanje uređaja: vidi upute na drugoj stranici



### Opcije podešavanja upravljački dio 5

#### Upravljanje putem kostiju

##### junior

Sljedeće funkcije moguće je samostalno podešavati:

- biranje slušnih programa
- podešavanje jačine zvuka
- uključivanje / isključivanje uređaja: vidi upute na drugoj stranici

